


CHECK TOOL

Check Tool is ontworpen om de nauwkeurigheid van de getoonde waarden van de LymphScanner te beoordelen in vergelijking met de referentiewaarde die in de fabriek is ingesteld. De checktool is een accessoire en kan worden gekocht bij de fabrikant of een erkende Delfin-distributeur (Varodem BV).




Handleiding

1. Schakel de LymphScanner in door op de grote bedieningsknop te drukken.
2. Druk nogmaals op de knop en houd deze ingedrukt totdat MENU wordt weergegeven. De inhoud van het menu met twee pagina's begint te scrollen.
3. Selecteer **Check Tool** uit het MENU door opnieuw op de bedieningsknop te drukken. U ziet nu de indicator ">" voor de rij **Check Tool** op pagina 2. De LymphScanner bevindt zich nu in de controle toolmodus en READY wordt weergegeven.

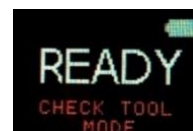

4. Plaats de LymphScanner op de Check Tool en houd deze rechtop en stabiel. Als het bericht LOW FORCE verschijnt, drukt u met meer kracht, totdat alleen MEASURING wordt weergegeven

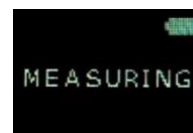

5. Wanneer de controlemeting is voltooid, wordt PASS weergegeven voor het geaccepteerde bewerkingsbereik.

Dit wil zeggen dat de LymphScanner nog niet gekalibreerd hoeft te worden en dat de metingen op dit moment accuraat zijn.



6. Als FAIL herhaaldelijk wordt weergegeven, neemt u contact op met uw lokale Delfin-vertegenwoordiger (Varodem BV) of het hoofdkantoor (info@delfintech.com) om de LymphScanner te kalibreren. (Voor kalibratie moet de LymphScanner worden opgestuurd naar de fabrikant in Finland. U kunt hierdoor de LymphScanner voor maximaal 4 weken niet gebruiken. TIP: Laat uw LymphScanner kalibreren tijdens uw vakantieperiode.)



De LymphScanner wordt automatisch uitgeschakeld en keert terug naar de normale meetmodus, als deze 60 seconden niet wordt gebruikt. De Check Tool-modus kan ook in het MENU worden uitgeschakeld door Check Tool opnieuw te selecteren.