



MONTAGE INSTRUCTIES

— voor de —
Juzo Pressure Monitor



Verwijder anti-statisch
hoesje



Plaats een geschikte
batterij* (AA - 1,5 volt)



Controleer of slang stevig
bevestigd is aan
bedieningseenheid



Schuif plastic disposable
hoesje over positioneerhulp
met sensor

*voor de langste levensduur gebruikt u een ultimate lithium batterij 1,5 volt

Lees altijd voor gebruik de handleiding door

tink2go.nl



GEBRUIKS INSTRUCTIES


— voor de —
Juzo Pressure Monitor



Zwachtel het been



Druk op de aanknop. Schuif de sensor onder de zwachtel richting enkel aan de binnenkant van het been*. Blijf \pm 10-15 cm boven de enkelknobbel (B1)

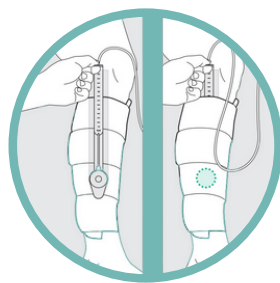

Lees direct de druk af op het display



Trek na de meting de positioneerhulp samen met beschermhoesje onder de zwachtel uit



Verwijder het beschermhoesje en berg apparaat na gebruik op in de koffer

*U kunt er ook voor kiezen om de sensor voor het zwachtelen tegen het been te leggen.

Lees altijd voor gebruik de handleiding door

tink2go.nl