



KIKUHIME DRUKMETER

montage en gebruik



Gereedmaken van de Kikuhime



leg alle onderdelen klaar

Stap 1



bevestig eerst het korte slangetje aan de meter

Stap 2




bevestig nu de lange slang aan de koppeling
en draai de doorzichtige bevestiging aan

Stap3



Kalibreren van de Kikuhime

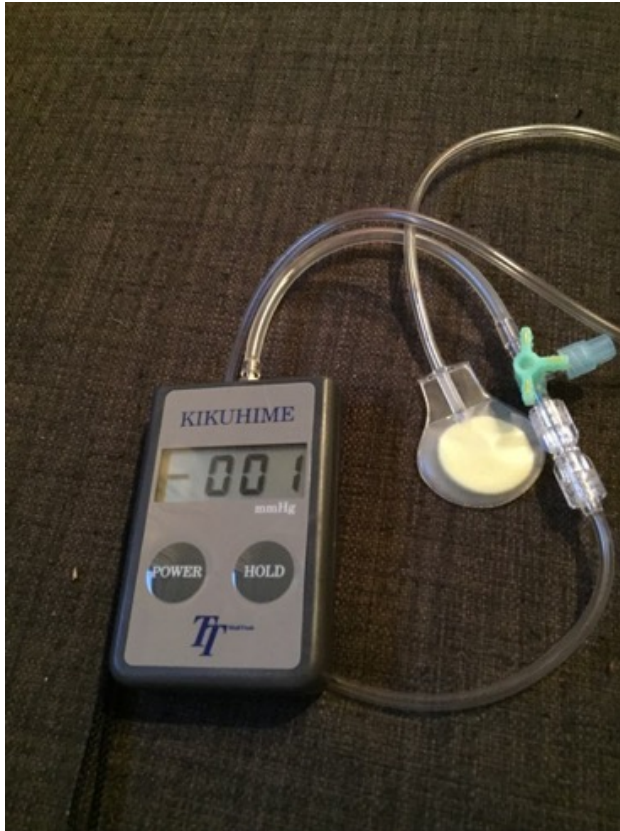

zet de powerknop aan

Stap 4



met de schroevendraaier zachtjes draaien tot 000 verschijnt

Stap 5



Stap 6



Gebruik van de slide




Stop de gele sensor in de blauwe slide en leg de voeler aan de binnenkant van het been t.h.v. de aanhechting achillespees

Stap 1



Stap 2

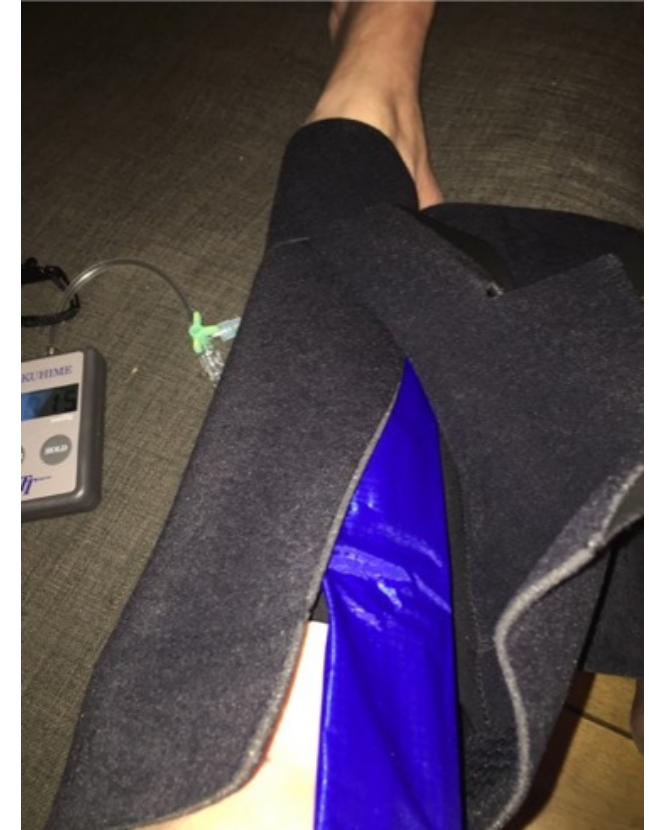

Stap 3



Meten met de Kikuhime onder een verband

(in dit geval wordt er een VaroCare klittenbandzwachtel gebruikt)



Rustdruk
(been horizontaal)



werkdruk
(met voet in dorsaal flexie)

Hoe groter het verschil in druk tussen statisch en dynamisch; hoe groter de stiffness (stijfheid) van het verband en hoe sneller het oedeem gereduceerd wordt



het verwijderen van de Kikuhime meter



trek de slide onder het verband uit door aan het kleine blauwe lipje te trekken

controleer of de druk van het verband lager wordt naar mate je de sensor verder richting de knie trekt.



Voordat u de meter gebruikt:

Checkt u of de slangen goed zijn bevestigd en er geen lucht kan ontsnappen:

1 De doorzichtige bevestigingsdoppen moeten goed zijn aangedraaid.

2 Het 'kraantje' staat in de lengterichting van de slang gericht.

3 Er kan maar 1 sensor tegelijk aangesloten worden

